



# KICK THE TICK®expert - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



ИНСТРУМЕНТ  
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО  
УДАЛЕНИЯ КЛЕЩЕЙ  
KICK THE TICK®

СРЕДСТВО  
ДЛЯ ЗАМОРАЖИВАНИЯ  
КЛЕЩЕЙ  
KICK THE TICK®



## ПРИМЕНЕНИЕ

KICK THE TICK® ЭКСПЕРТ  
НАБОР ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ КЛЕЩЕЙ ИЗ КОЖИ  
это медицинское устройство, предназначенное для  
для удаления клещей из кожи человека и животных.

Рекомендуется для снижения риска заражения  
болезнями, передаваемых клещами,  
таких как: клещевой энцефалит, болезнь Лайма,  
бабезиоз (пироплазмоз), анаплазмоз и другие.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ЧТО ТАКОЕ KICK THE TICK® expert - НАБОР ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ КЛЕЩЕЙ ИЗ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ.
2. НАПАДЕНИЕ КЛЕЩА И ПЕРЕДАЧА ПАТОГЕНОВ
3. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
6. KICK THE TICK ЭКСПЕРТ НАБОР ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО УДАЛЕНИЯ КЛЕЩЕЙ ИЗ КОЖИ
7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАМОРАЖИВАНИЯ
8. ХРАНЕНИЕ

## ВНИМАНИЕ!

Перед применением тщательно ознакомьтесь с инструкцией по использованию.

Продукт следует использовать в соответствии с инструкциями в этом руководстве.

В случае сомнений обратитесь к врачу или фармацевту.

Инструкцию по использованию нужно сохранить.

В случае необходимости прочитайте ее снова.

## 1. НАБОР KICK THE TICK® ЭКСПЕРТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ В СЛУЧАЯХ УКУСА КЛЕЩА

НАБОР СОСТОИТ ИЗ МЕДИЦИНСКОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАМОРАЖИВАНИЯ КЛЕЩЕЙ И ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО УДАЛЕНИЯ. ЗАМОРАЖИВАНИЕ НАПРАВЛЕНО НА СНИЖЕНИЕ РИСКА ПЕРЕДАЧИ ПАТОГЕННЫХ АГЕНТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ КЛЕЩАМИ.

### СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ:



Применение продукта вызывает замораживание и торможение секреция инфекционной слюны клещей.

APRF™  
technology



Применённая технология APRF™ (Пленка для фиксации паразитов) создает прочное покрытие, которое предотвращает повреждение (разрыв) клеща во время его удаления, что сводит к минимуму риск контакта с инфекционным материалом.



Устройство, входящее в набор для безопасного удаления клещей KICK THE TICK® упрощает эффективное и безопасное удаление паразита, что еще больше ограничивает возможность передачи инфекционных агентов во время процедуры.

## 2. КЛЕЩЕВАЯ АТАКА И ПЕРЕДАЧА ПАТОГЕНОВ

Люди и домашние животные подвергаются нападению на всех этапах развития клещей, однако чаще всего паразитируют нимфы и самки.

Укус клеща не ощущается.

Присасывание может произойти, где угодно на теле, но обычно выбираются места, где кожа человека мягкая и легко разрезается, например, в кожных складках на шее и на границе волос на голове.



Инфекционные агенты могут передаваться в кровь человека либо животного в первые часы после присасывания клеща.

Однако, как правило, риск передачи микробов **значительно возрастает через 24 часа после присасывания**. Инфекция также может иметь место при контакте с жидкостями организма поврежденного клеща.

Чтобы уменьшить риск передачи инфекционных микроорганизмов, клещей следует удалить так быстро, насколько это возможно.

### Рекомендуется

#### РЕПЕЛЛЕНТ

#### KICK THE TICK® - MAX REPELENT PLUS

ЭФФЕКТИВНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
ОТ НАПАДЕНИЯ  
КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ

ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПОДТВЕРЖДЕННАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ



200 ml

## НОВИНКА



**ШАГ 1: ЗАМОРАЖИВАНИЕ ПРИСОСАВШЕГОСЯ КЛЕЩА**


**1**

Отсоединить устройство для удаления клещей от аппликатора




**2**

Разблокировать аппликатор путем поворота кольца из положения закрыто в открыто

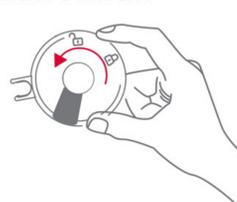

**3**

Поместить насадку аппликатора на клеща

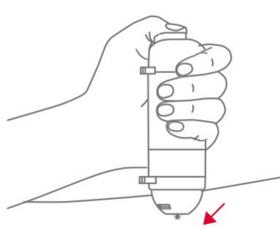

**4**

Нажмите кнопку аппликатора до упора, чтобы высвободить дозу \* ПРЕПАРАТА




**5**

После процедуры аппликатор должен быть закреплен путем поворота кольца от открытого в закрытое положение



**!** Перед первым использованием средства аппликатор должен быть активирован двойным нажатием кнопки

**2X**

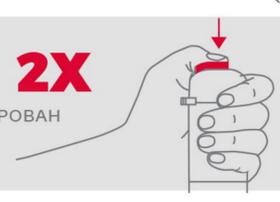


\* количество доз зависит от размера клеща (таблица ниже):

личинка и нимфа иксодового клеща (IXODES RICINUS)	самка иксодового клеща (I. RICINUS)	самка клеща ДЕРМАЦЕНТОР (DERMACENTOR RETICULATUS)
<b>1 НАЖАТИЕ</b>	<b>2 НАЖАТИЯ</b>	<b>2 НАЖАТИЯ</b>
 0,8mm 1,5mm	 ок. 3,5mm	 ок. 5mm
<b>СТОРОНА А</b>	<b>СТОРОНА В</b>	

ВРЕМЯ МЕЖДУ НАЖАТИЯМИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 3 СЕКУНДЫ

АППОЛИКАТОР РАБОТАЕТ ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ

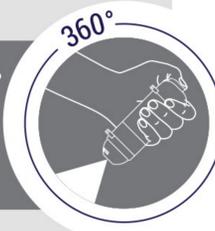

**ШАГ 2: УДАЛЕНИЕ ЗАМОРОЖЕННОГО КЛЕЩА**

Чтобы удалить замороженного клеща используйте устройство (в комплекте) клещедёр для безопасного удаления.


Устройство используется в соответствии с инструкциями по использованию и облегчает полное извлечение клеща, а также ограничивает передачу инфекционных агентов во время процедуры



Удаление впившегося клеща должно выполняться очень осторожно, используя правильно выбранную сторону (А или В) прибора. Выбор наконечника устройства следует адаптировать к размерам присосавшегося клеща (личинка / нимфа или самка)

**1**

С помощью правильно выбранного наконечника устройство для удаления клещей должно прочно подходить к прикрепленному клещу, как можно ближе к поверхности кожи

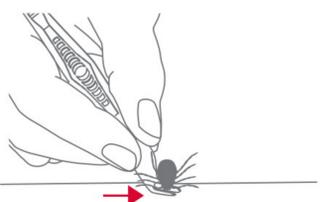

**2**


Уверенным движением вытащите клеща ВВЕРХ



**!** НЕ КРУТИТЬ


**3**

Сразу удостоверьтесь, что в ранке не осталось никаких фрагментов клеща. Прозеинфицируйте ранку после удаления клеща

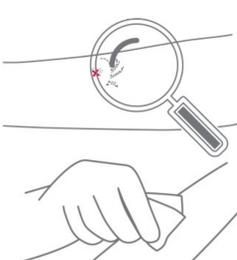

**4**

Утилизируйте удаленного клеща или положите в пробирку для выполнения диагностических тестов

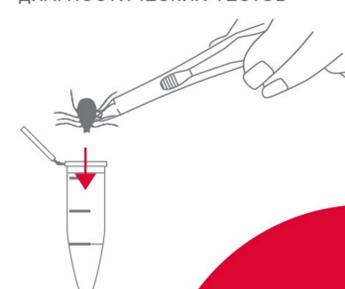

**5**

Прозеинфицируйте инструмент используемый для этой процедуры. Тщательно вымойте руки с мылом или прозеинфицируйте



**!** **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!**  
 Небрежное выполнение процедуры может привести к разрыву клеща и увеличению риска контакта с инфекционным материалом. Чтобы избежать прямого контакта с клещом рекомендуется для выполнения извлечения пользоваться защитными перчатками

**ВНИМАНИЕ!**  
 В случае позднего обнаружения впившегося паразита. Происходит прочная фиксация ротовых органов, что затрудняет его удаление. Если в коже после процедуры остались фрагменты клеща, их должен удалить врач.

**4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Если клещ прикреплен в месте, которое затрудняет его удаление (вокруг паха, подмышек, позади уха, подколенной ямки), рекомендуется, чтобы процедура выполнялась с помощью третьих лиц.

После процедуры удаления клещей место укуса следует наблюдать в течение нескольких недель. Появление местного или общего воспаления может быть следствием передачи инфекционных агентов клещем. Если вы чувствуете недомогание, испытываете лихорадку или появилась мигрирующая эритема, что характерно для болезни Лайма, вы должны немедленно обратиться за советом к врачу или фармацевту.

**5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- ⊕ Продукт следует использовать по назначению, соблюдая инструкции по использованию.
- ⊕ Не следует применять на детях до 3 лет.
- ⊕ Если продукт применяется на детях, процедура должна проводиться под наблюдением взрослого.
- ⊕ Не используйте на поврежденной коже.
- ⊕ Не используйте в случае гиперчувствительности (аллергии) к любому компоненту продукта.
- ⊕ Избегайте контакта продукта с глазами, областью глаз, слизистыми оболочками рта и носа.
- ⊕ Не вдыхайте.
- ⊕ Применение слишком большого количества продукта может привести к покраснению кожи. В этом случае немедленно прекратите использование продукта, а затем промойте кожу большим количеством теплой (не горячей!) воды и вытрите насухо.
- ⊕ В случае постоянных изменений кожи (отбеливание или покраснение, отек, боль) обратитесь за медицинской помощью к врачу.
- ⊕ Продукт, предназначенный для внешнего использования.

**6. Состав набора KICK THE TICK® эксперт для безопасного снятия клещей с кожи**

- ⊕ Средство для замораживанию клещей с составом: изогексадекан, изопропилмиририлат, 1,1,1,2-тетрафторэтан
- ⊕ Устройство (клещедёр) для безопасного удаления KICK THE TICK®.
- ⊕ Пробирка (эппендорф)

**7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ДЛЯ ЗАМОРАЖИВАНИЯ КЛЕЩЕЙ KICK THE TICK®**

Медицинское устройство KICK THE TICK® содержит около 60 доз, что позволяет безопасно удалять до 40 клещей.

**8. ХРАНЕНИЕ**

ХРАНИТЕ НАБОР В ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ В ТЁМНОМ МЕСТЕ НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НИЖЕ 40 ° С.

**ВНИМАНИЕ** Комплект содержит контейнер под давлением. Нагревание может привести к взрыву. Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искры, открытого огня и других источников воспламенения. Не курите. Не прокалывайте и не поджигайте даже после использования. Защитите от попадания солнечного света. Хранить в недоступном для детей месте.



**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

ICB Pharma  
 Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Spółka Jawna  
 ul. Moździerzowców 6a, 43-602 Jaworzno